

# AP AMBULANS POLSKA

ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE



**ІНСТРУКЦІЯ**  
**ЩОДО КОРИСТУВАННЯ**  
**ПАНЕЛЯМИ КЕРУВАННЯ,**  
**КЕРУВАННЯ ФУНКЦІЯМИ**  
**EXT, INT, O<sup>2</sup>, °C**


**FORD**  
**TRANSIT**

# ДИСПЛЕЙ МЕДИЧНОГО САЛОНУ



Функція ввімкнення - вимкнення живлення панелі керування

Панель керування функціями: EXT, INT, O<sup>2</sup>, °C

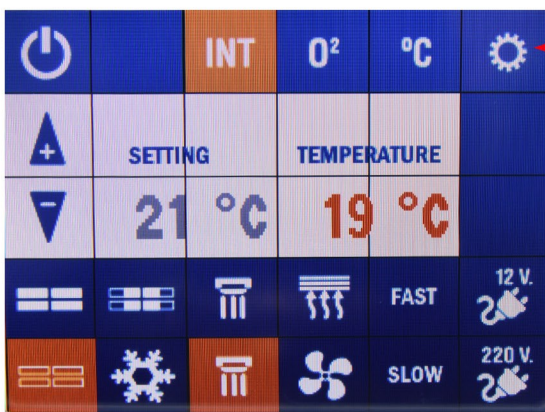

**УВАГА!**



Функція призначена для обслуговування виробником транспортного засобу, перепрограмування даної функції третіми особами призведе до неправильної роботи і контролю медичного салону, втратою гарантії на медичний салон.

**Повторне програмування правильного обслуговування медичного салону відбувається за кошти користувача транспортного засобу швидкої медичної допомоги.**




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.


37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563



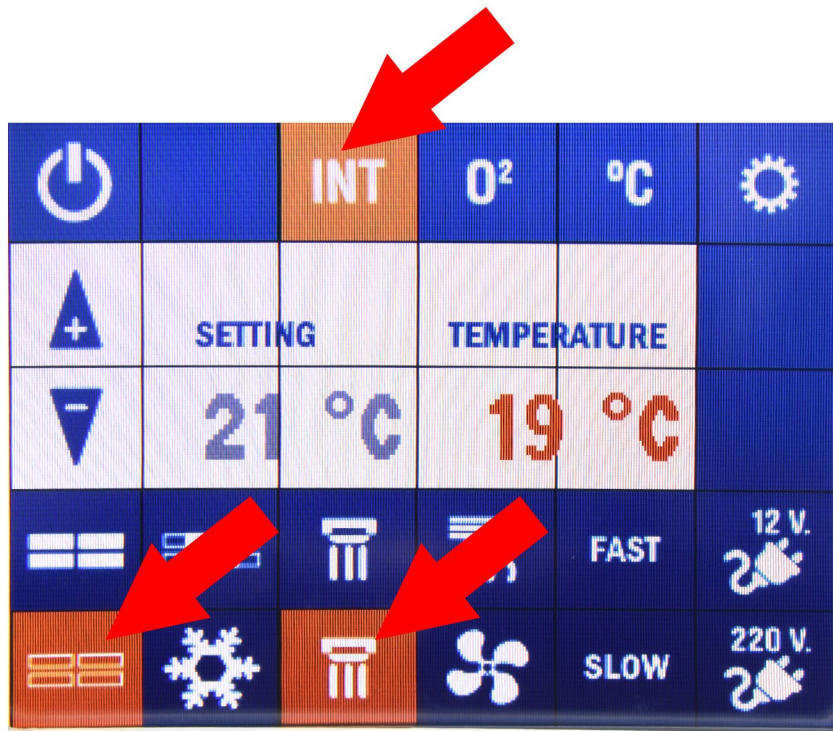

Мал. 1 - Функція керування освітленням

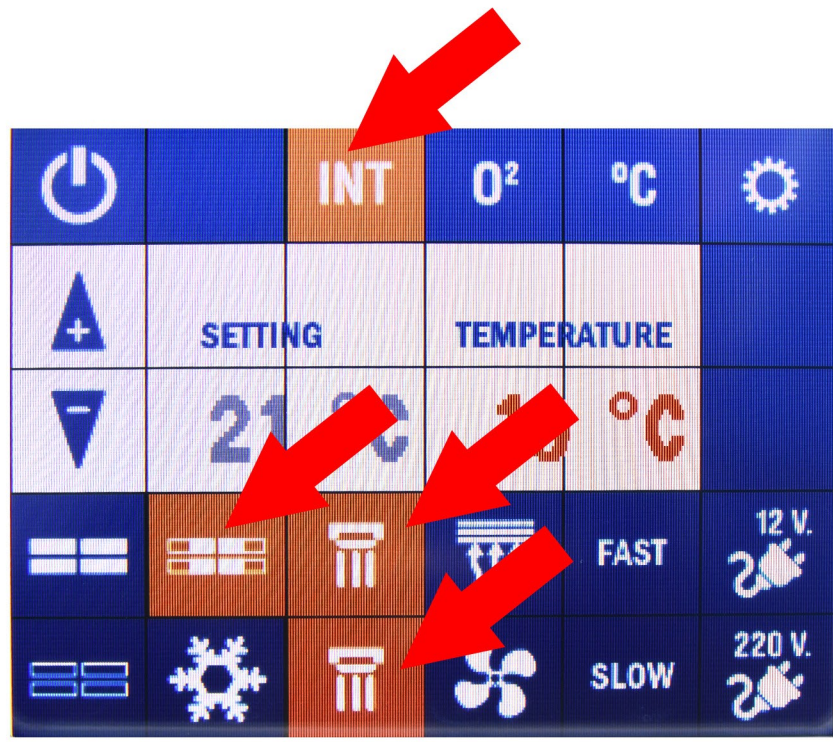

Мал. 2 – Функція керування галогенним освітленням над ношами




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.


37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563



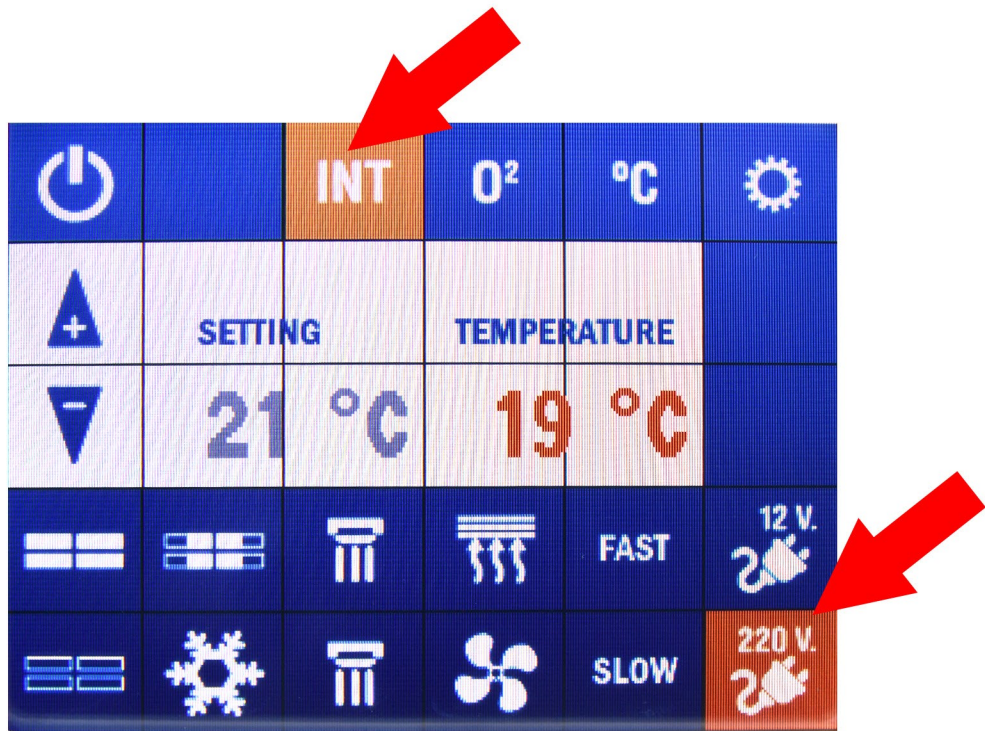

Мал. 3 - Функція ввімкнення перетворювача напруги 12В/220В

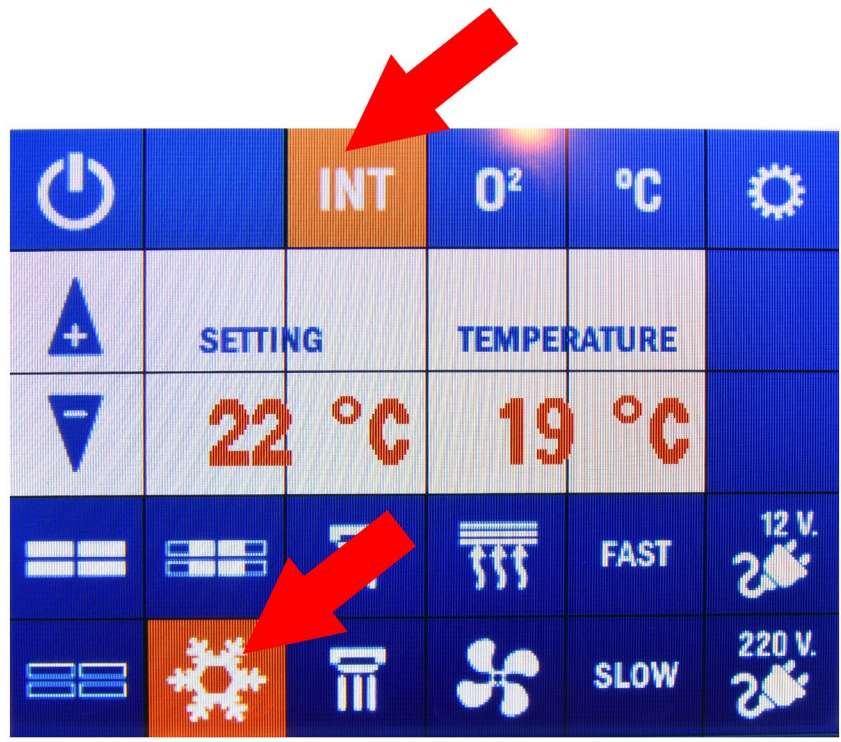

Мал. 4 - Функція ввімкнення/вимкнення кондиціонера




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.


37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563



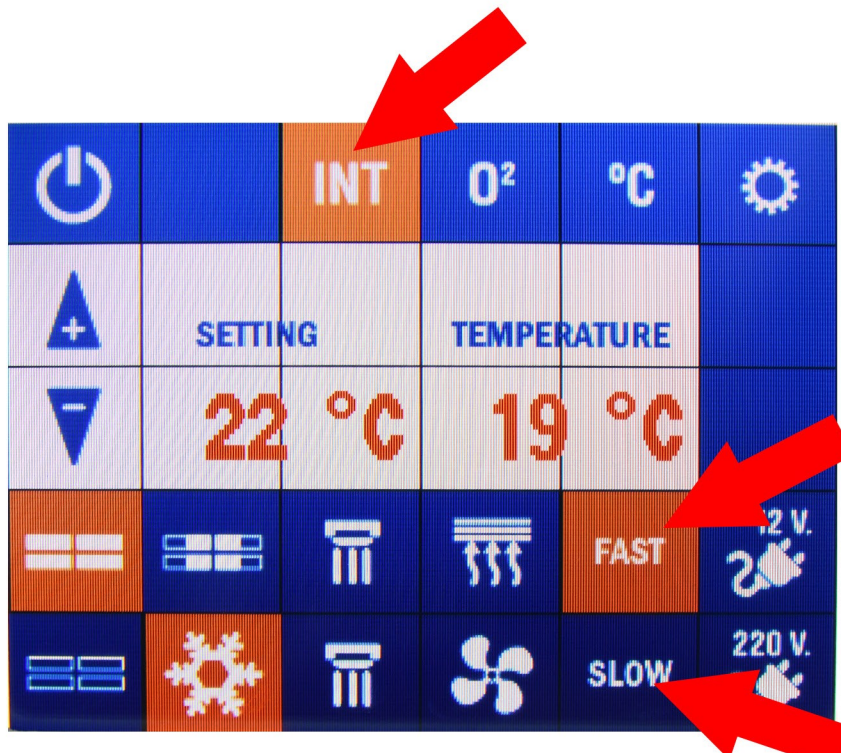

**Мал. 5 - Режими: швидко, повільно  
FAST - швидко, SLOW - повільно**

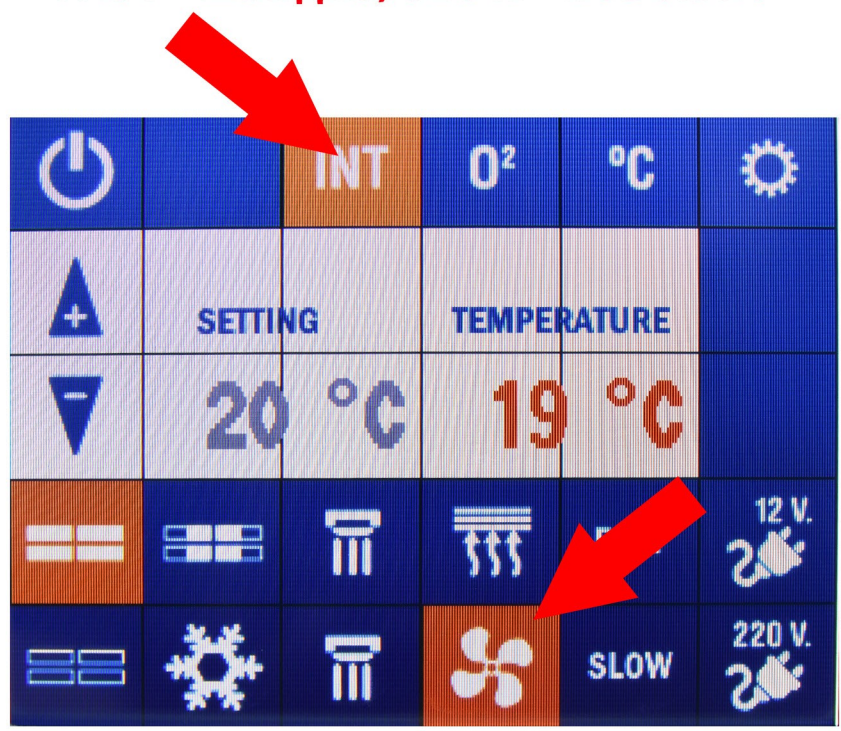

**Мал. 6 - Функція ввімкнення/вимкнення  
припливно-втяжного вентилятора**




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.


37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563



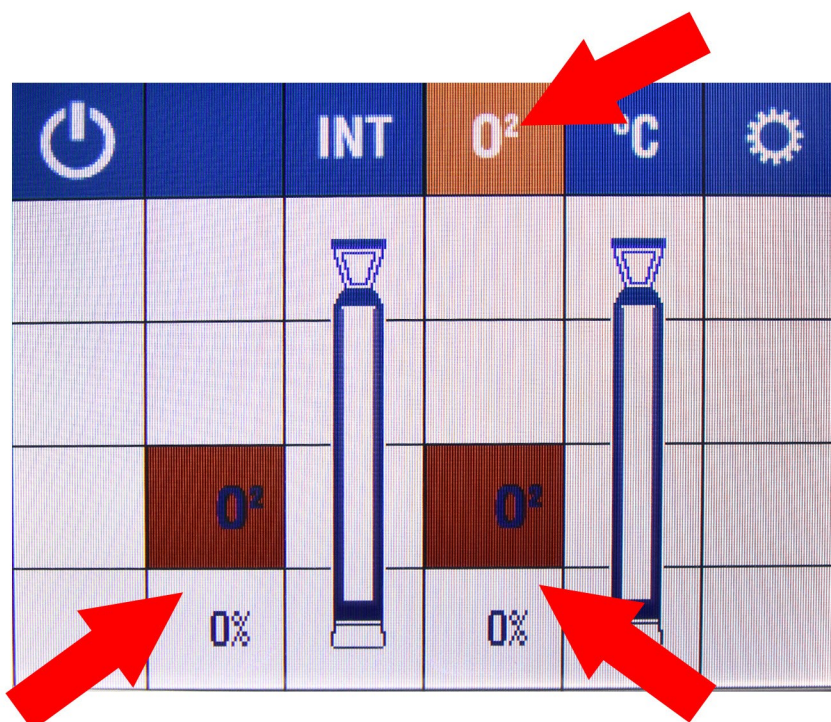

Мал. 7 - Функція контролю рівня кисневого балона

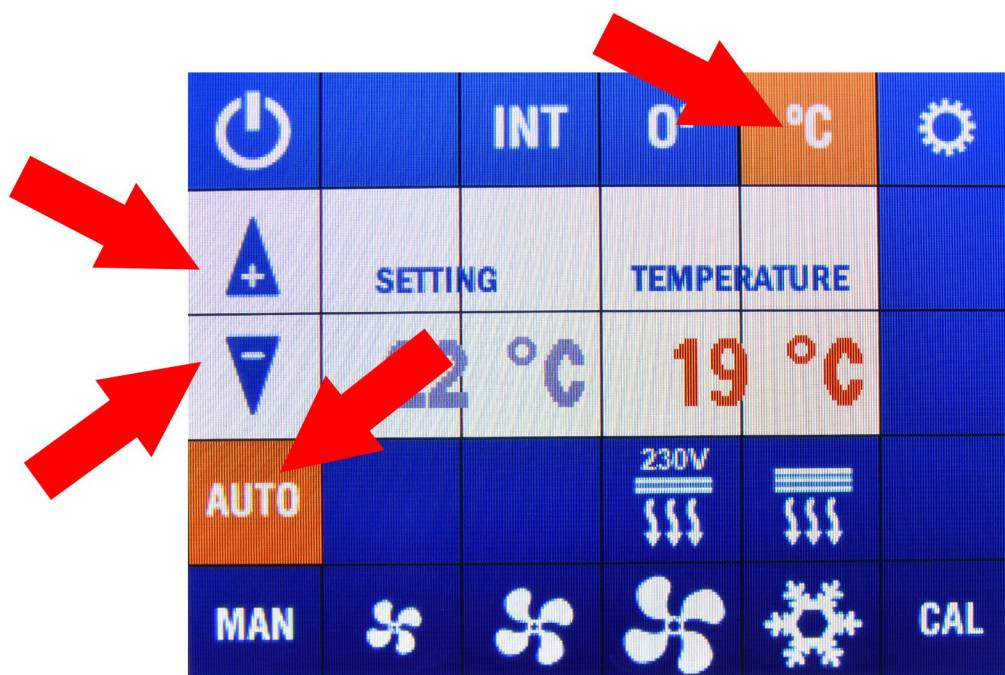

Мал. 8 - Функція керування кондиціонером « + », « - », « AUTO », налаштування температури повітря




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563




# ДИСПЛЕЙ КАБІНИ ВОДІЯ

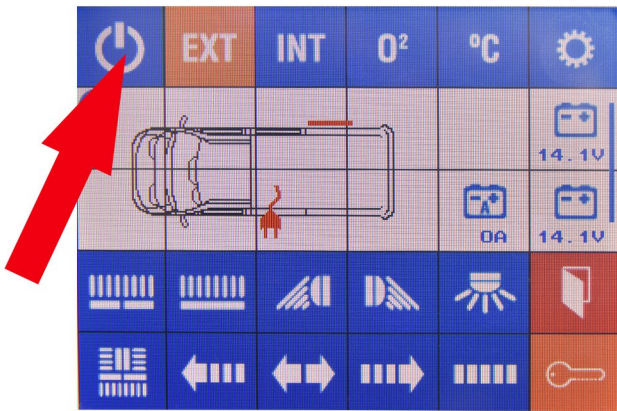

Функція ввімкнення - вимкнення живлення панелі керування

Панель керування функціями: EXT, INT, O<sup>2</sup>, °C

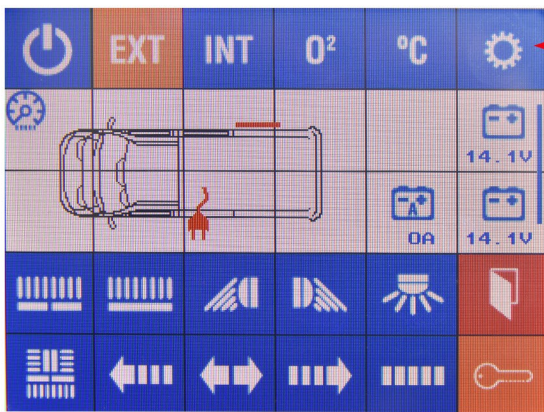

**УВАГА!**



Функція призначена для обслуговування виробником транспортного засобу, перепрограмування даної функції третіми особами призведе до неправильної роботи і контролю медичного салону, втратою гарантії на медичний салон.

**Повторне програмування правильного обслуговування медичного салону відбувається за кошти користувача транспортного засобу швидкої медичної допомоги.**




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8


Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563



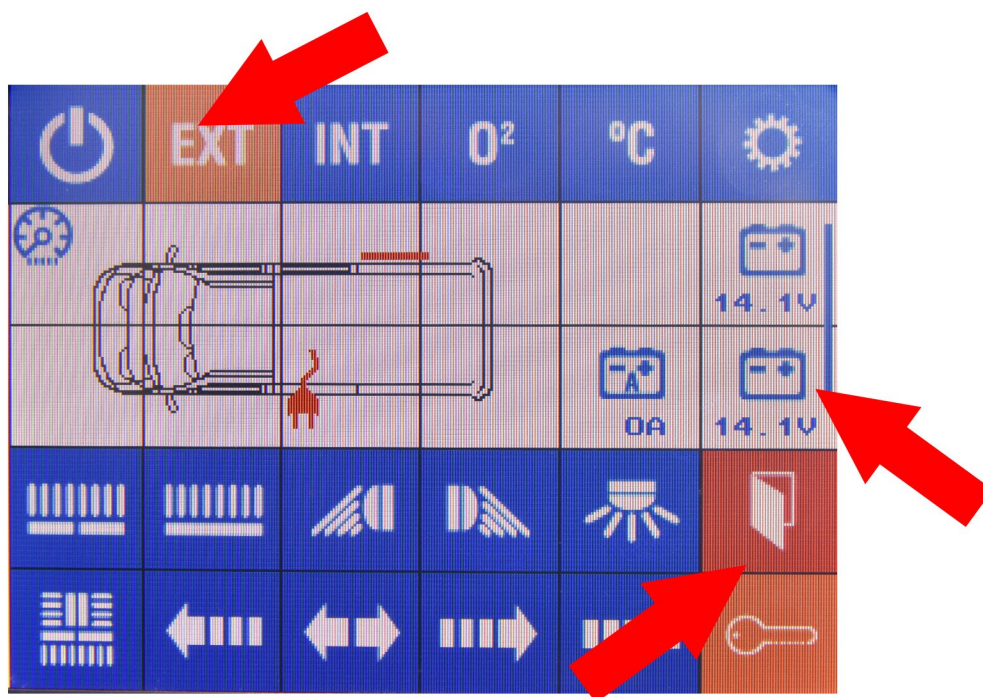

**Мал. 9 - Функція контролю рівня заряду:  
Акумулятор основний /допоміжний**

На малюнку зображено ввімкнення живлення 220В.  
Відкриті бічні двері медичного салону. Задіяно стоянкове гальмо.

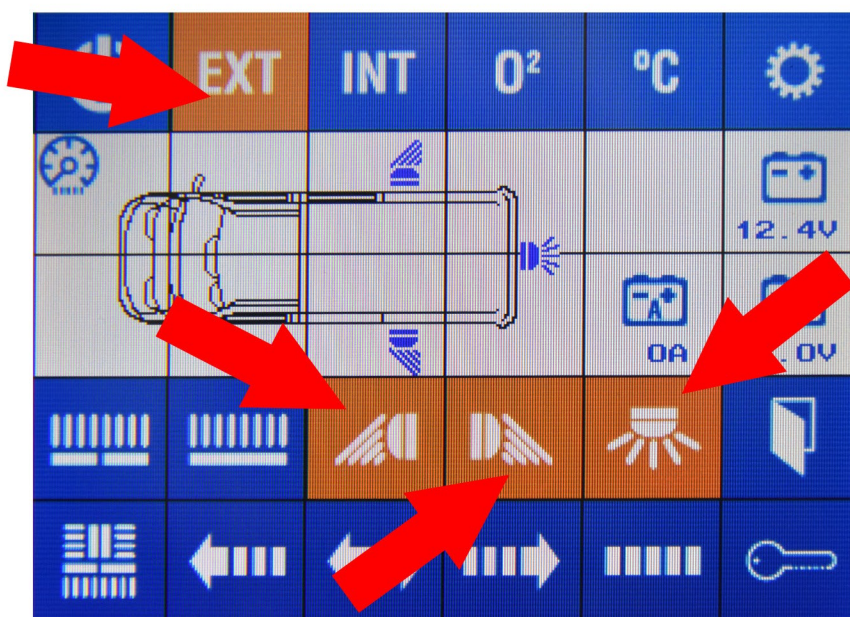

**Мал. 10 - Функція керування зовнішнім освітленням праворуч,  
ліворуч, ззаду автомобіля швидкої медичної допомоги**




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8


Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563





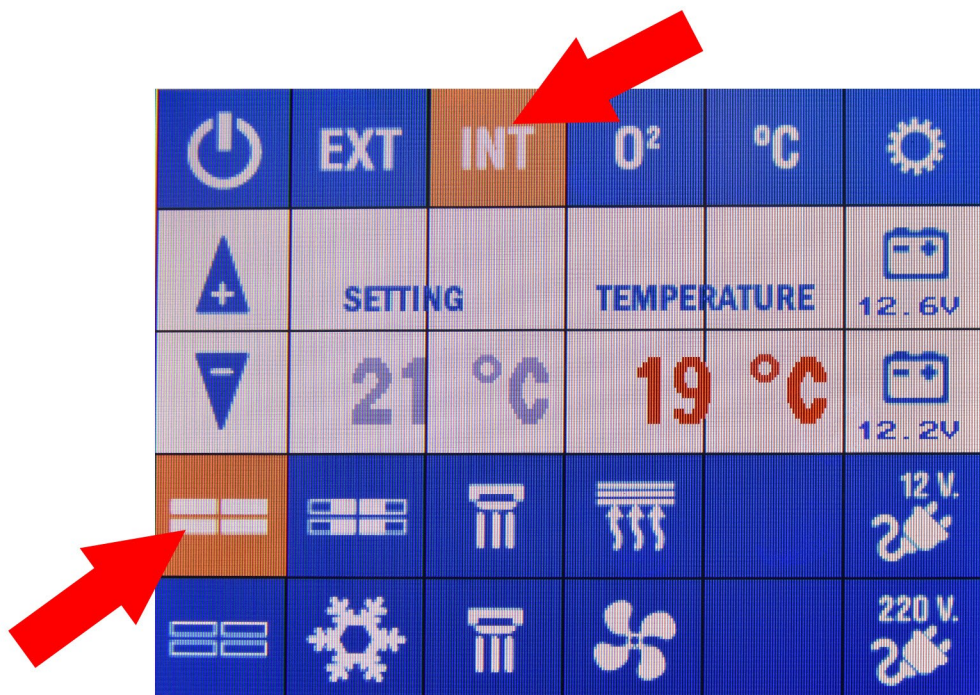

Мал. 11 - Функція керування освітленням медичного салону

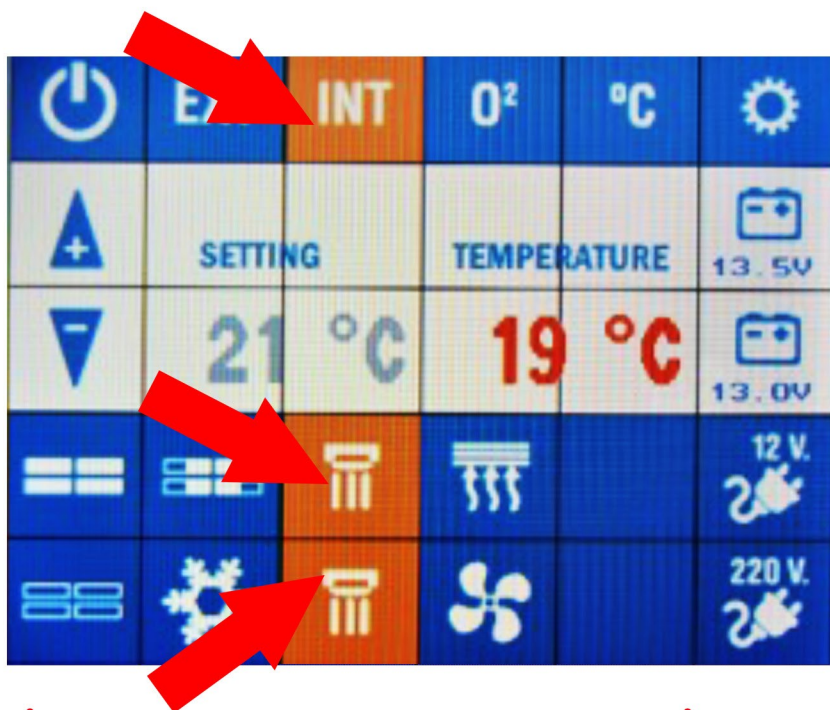

Мал. 12 - Функція керування галогенним освітленням над ношами




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.


37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563



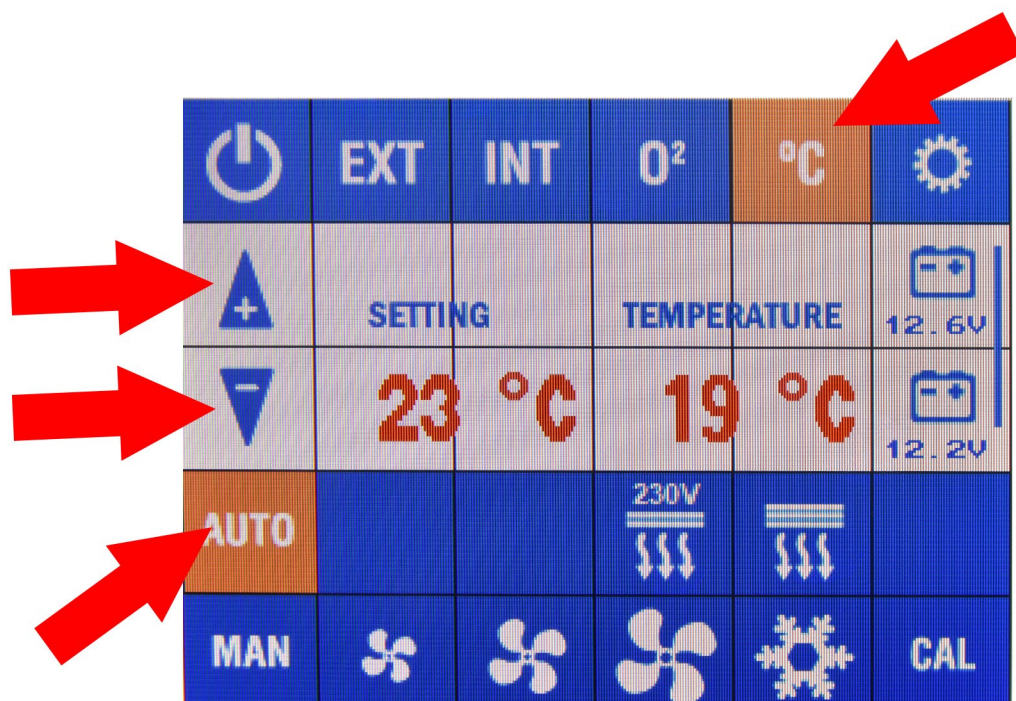

**Мал. 13 - Функція керування кондиціонером « + », « - », «AUTO», налаштування температури повітря**

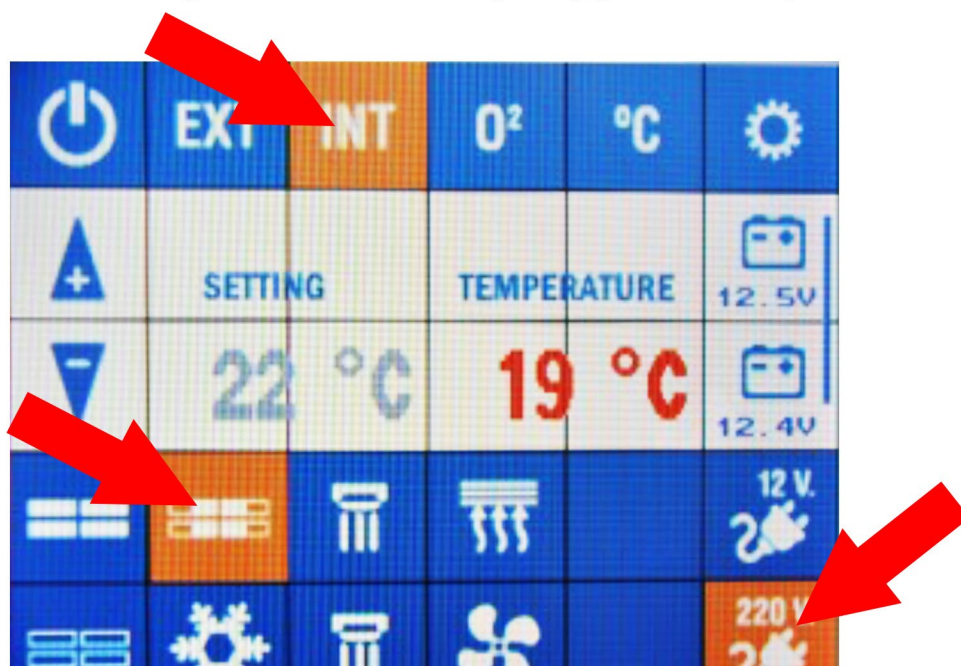

**Мал. 14 - Функція керування освітленням медичного салону. Функція ввімкнення перетворювача напруги 12В/220В**



**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.


37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563





Мал. 15 - Функція вентиляції

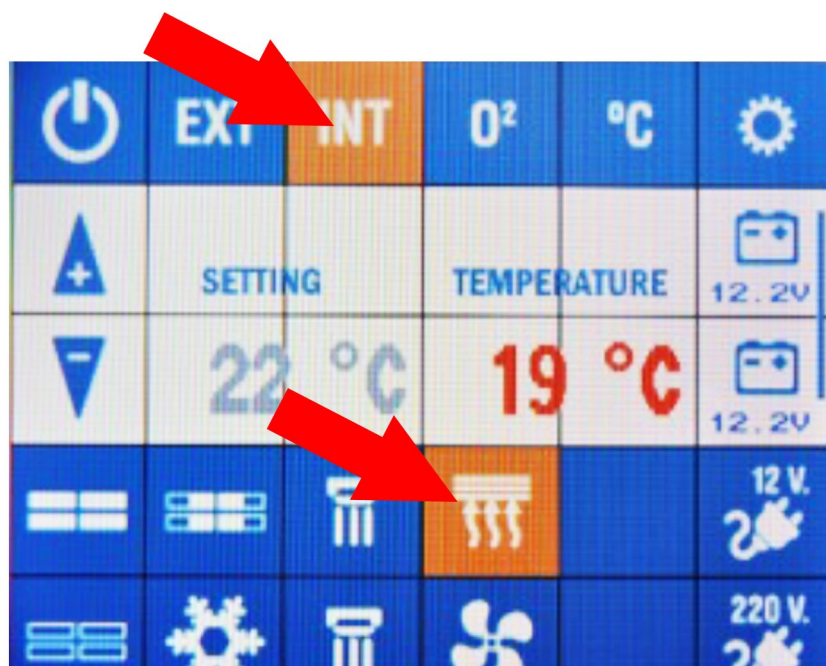

Мал. 16 - Функція витяжки




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.


37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563



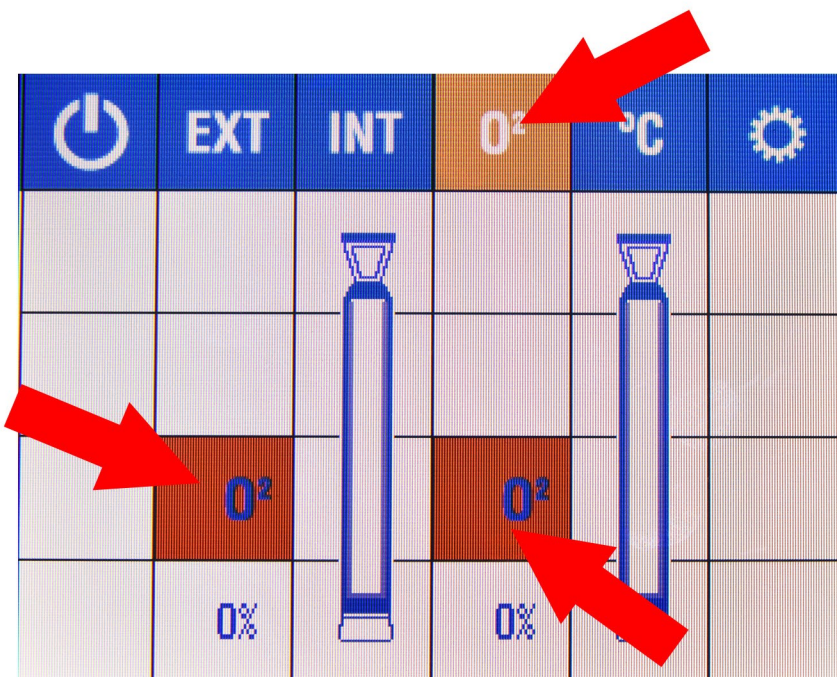


Мал. 17 - Функція контролю рівня кисневого балона

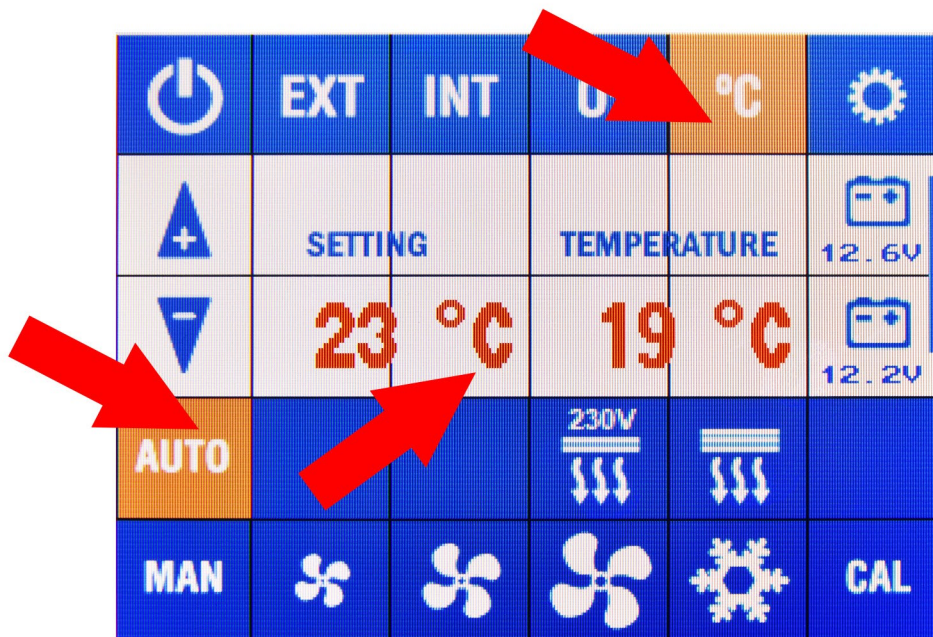


Мал. 18 - Функція автоматичного кондиціонування ( темп. 19 °C)  
Задана температура 23 °C ( +, -)



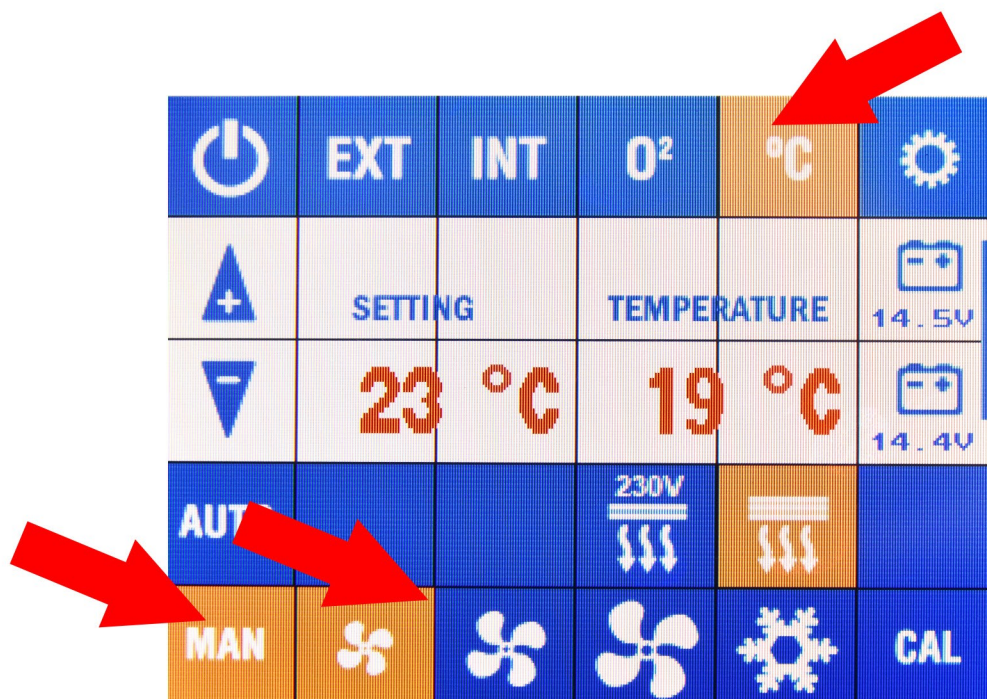

**Мал. 19 - Функція MAN (мануальне налаштування кондиціонера)  
Доступні три швидкості вентилятора.**

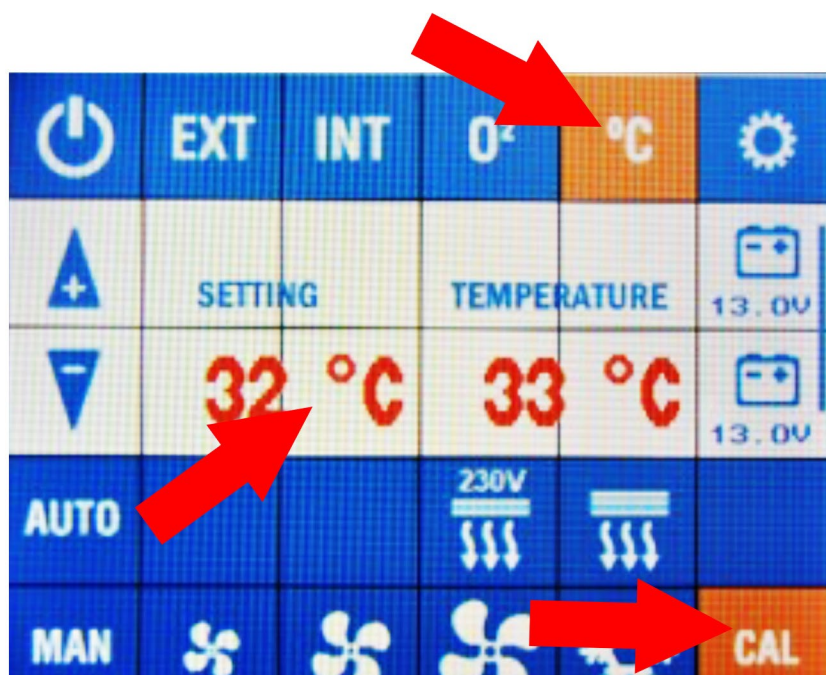

**Мал. 20 - Функція CAL - стала температура термобоксу**



**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563



# Zabezpieczenia



**Мал. 21**  
**- Головний вимикач напруги.**



**Мал. 22**  
**- Панель керування пристроями заднього та бічних виходів з медичного салону.**



**Мал. 23**  
**- Передпусковий підігрівач DEFA.**



**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563



# ЗОВНІШНЄ ЖИВЛЕННЯ

## УВАГА !

**1. Спершу потрібно підключити кабель зовнішнього живлення до транспортного засобу.**



**2. Далі потрібно підключити кабель зовнішнього живлення до розетки.**



**Зміна порядку підключення може призвести до займання розетки транспортного засобу і повної його поломки.**




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563



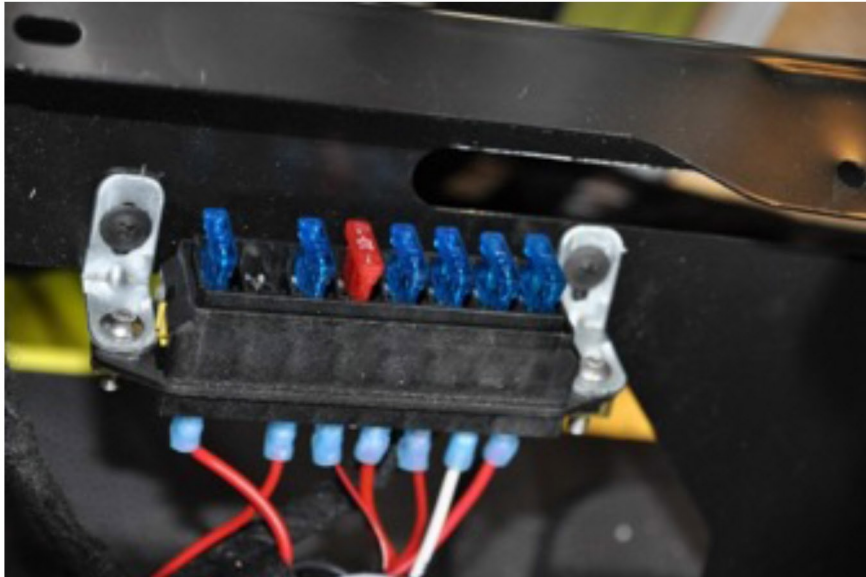

1. WEBASTO

3. DEFA

5. Дверний замок

7. Розетка /USB

2. WEBASTO

4. Розетка 12В

6. Дверне реле

8. Розетка 12В



**Запобіжник 80А - Перетворювач напруги 12В/220В**



**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563





# Маєте запитання?

Телефонуйте, пишiть. З радістю Вам допоможемо!

## Ambulans Polska

Zabudowy Specjalistyczne Sp. z o.o.

37-500 Jarosław, ul. Bandurskiego 8

Tel: +48 16 6214150

Marcin Górski

Tel: +48 661 914 263

marcin@ambulanspolska.pl



Jerzy Tarkowski

Tel: +48 664 433 112

jerzy@ambulanspolska.pl




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563



*jakość potwierdzona certyfikatami*

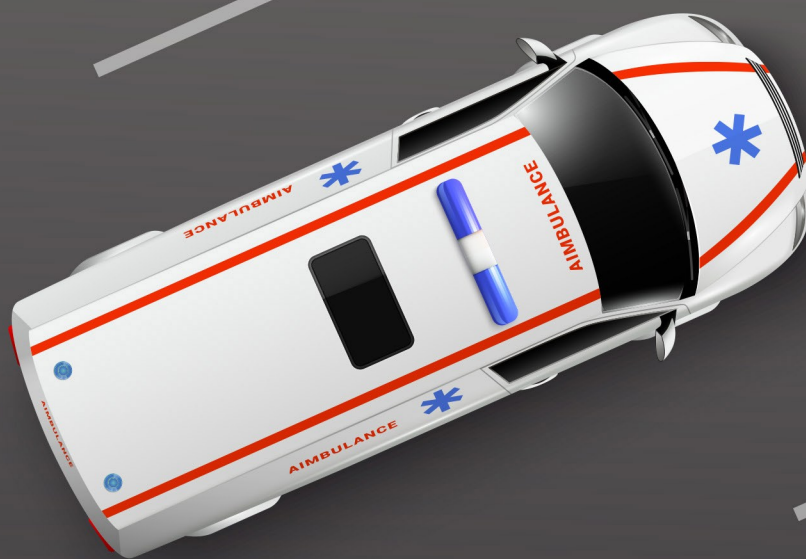

**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563

**AP** **AMBULANS POLSKA**  
**ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE**

[www.ambulanspolska.pl](http://www.ambulanspolska.pl)